




より効果を感じていただくために、必ずご確認ください。

平編み弾性筒状包帯「エアボ・ウェーブスリーブ」


ご使用のしおり

■エアボ・ウェーブスリーブ装着方法 ※装着の際はゴム手袋の使用を推奨いたします。

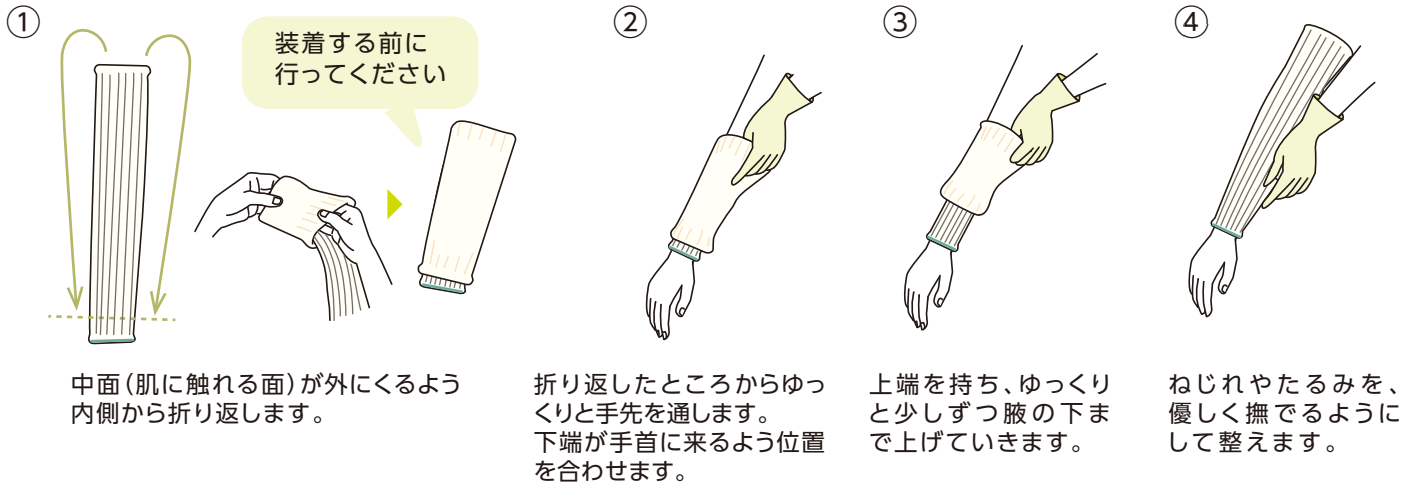

■装着時の注意点

1 外面の繊維は爪が引っ掛かると、ほつれの原因となりますのでご注意ください。

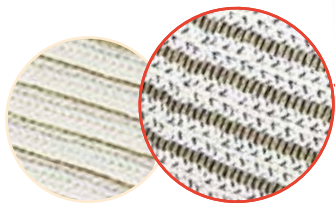

2 装着後は折り返さずにご使用ください。

3 肘を引っぱり上げず少し下げてください。


肘を少し下げることでずり落ちを防止します

■洗濯方法

普段どおりそのまま洗濯機へ天日干し・乾燥機もOK

ネット不要 柔軟剤・漂白剤の使用もOK

干し方 ▶ 中面を裏返し、平干してください ※洗濯ばさみは使用しないでください

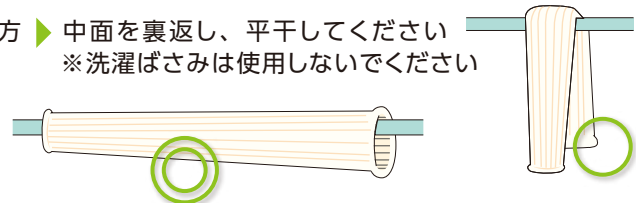

- ・変質するおそれがありますので、アイロンは使用しないでください。
- ・保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。

品質表示	
綿	82%
ポリウレタン	10%
ポリエステル	8%
※ラテックスフリー	

<製品の返品・交換について> 製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

