

待望のエアボ・ウェーブシリーズ第3弾

リムズ徳島クリニック

学校法人後藤学園

平編み弾性スリーブ 「エアボ・ウェーブ スリーブ」 ミトン付ショルダー

特許出願済み




三優メディカル

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、
後藤学園附属リンパ浮腫教育支援センター
との共同開発

特許取得済み

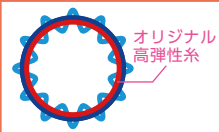

オリジナル
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時は
のびやすく穿きやすい設計でありながら、
装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ (シームレス) の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット

肩まわりを優しく包み込み
効果的に排液を促します



肘の曲線に合わせた機能的な設計



曲げてもシワが入りにくい
特殊な編み方で
肘まわりをサポートします



親指が動かしやすい
ゆとりある構造

どなたでも簡単に
装着できて、
浮腫を軽減できる
補助用スリーブです。
リンパ浮腫患者さまの
「部屋着」として、
日中家事をしながら…
就寝用としても
お使いいただけます。

圧迫力：
20~25
mmHg


様々な圧迫用品と
組み合わせて
使うことが
できます。

装着方法



- ①生地を半分に裏返します ②親指を上にして手を入れます ③全体をゆっくり引き上げます ④裏返した部分をつまみながら、少しずつ肩先まで引き上げます


装着時のPOINT

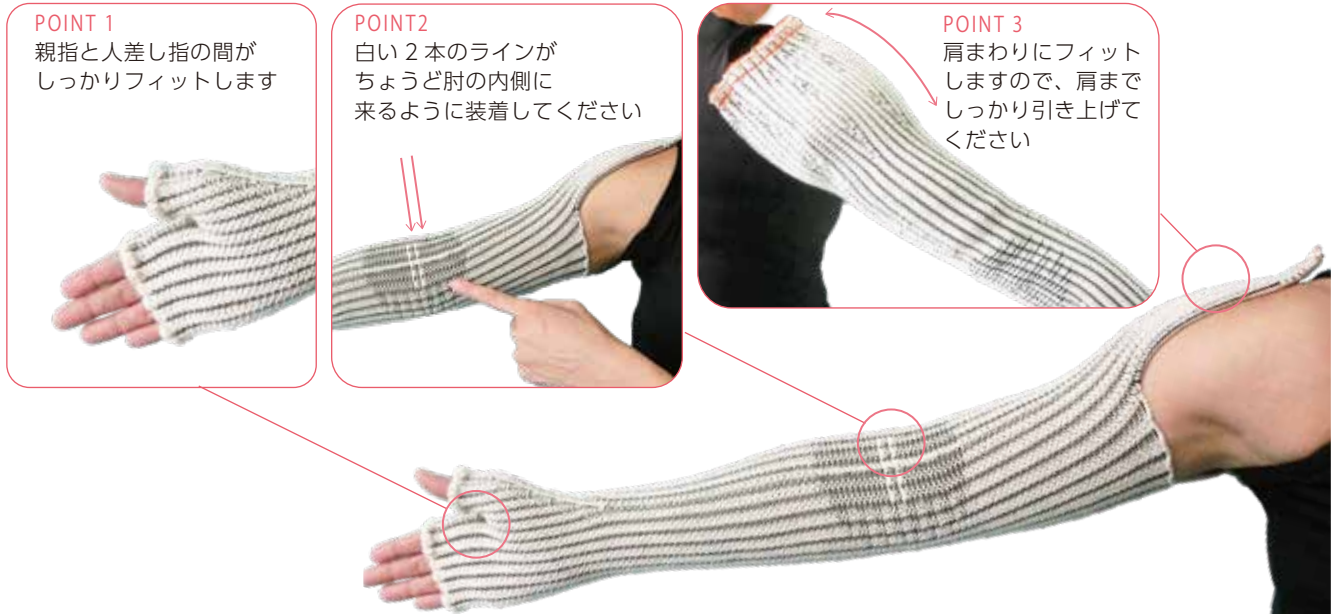

サイズ一覧

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000001

種類		商品コード	価格(税別)	B(手背周径)	C(手首周径)	D(前腕周径)	G(上腕周径)
右用	4号 ショート丈	AWSLMS4000S-(R)	16,000円	16~22cm	13~16cm	23~25cm	25~28cm
	ロング丈	AWSLMS4000L-(R)					
	5号 ショート丈	AWSLMS5000S-(R)	16,000円	16~22cm	15~19cm	24~27cm	27~31cm
	ロング丈	AWSLMS5000L-(R)					
	6号 ショート丈	AWSLMS6000S-(R)	16,000円	20~26cm	18~22cm	26~31cm	30~40cm
	ロング丈	AWSLMS6000L-(R)					
左用	4号 ショート丈	AWSLMS4000S-(L)	16,000円	16~22cm	13~16cm	23~25cm	25~28cm
	ロング丈	AWSLMS4000L-(L)					
	5号 ショート丈	AWSLMS5000S-(L)	16,000円	16~22cm	15~19cm	24~27cm	27~31cm
	ロング丈	AWSLMS5000L-(L)					
	6号 ショート丈	AWSLMS6000S-(L)	16,000円	20~26cm	18~22cm	26~31cm	30~40cm
	ロング丈	AWSLMS6000L-(L)					

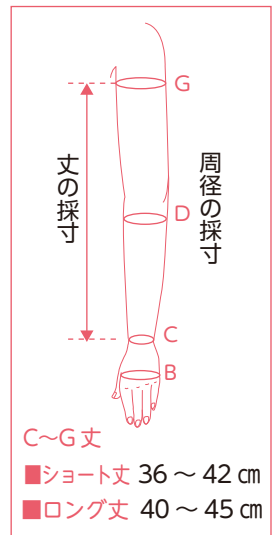

肩先のラインが1本はショート丈、2本はロング丈です。



肩先のラインの色でサイズの識別ができます。

4号	オレンジ
5号	グリーン
6号	レッド

品質表示	
綿	82%
ポリウレタン	10%
ポリエステル	8%
※ラテックスフリー	

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。



製造販売元:
三優メディカル株式会社
www.sanyu-medical.com
 〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地
 TEL **052-526-5017** FAX **052-526-5018**
 E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店