



より効果を感じていただくために、必ずご確認ください。

# 平編み弾性スリーブ 「エアボ・ウェーブスリーブ」ミトン付ショルダー ご使用のしおり

■装着方法 ※装着の際はゴム手袋の使用を推奨いたします。




①生地を半分に裏返します



②親指を上にして手を入れます



③全体をゆっくり引き上げます

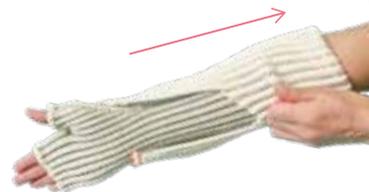

④裏返した部分をつまみながら、少しずつ肩先まで引き上げます

■装着時の注意点


1 親指と人差し指の間がしっかりフィットするまで引き上げてください



2 白い2本のラインがちょうど肘の内側に来るように装着してください



3 肩まわりにフィットしますので、肩までしっかり引き上げてください

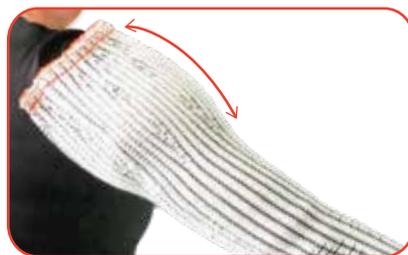


■洗濯方法

普段どおりそのまま洗濯機へ  
天日干し・乾燥機もOK

ネット不要

柔軟剤・漂白剤の使用もOK

干し方 ▶ 中面を裏返し、平干ししてください  
※洗濯ばさみは使用しないでください

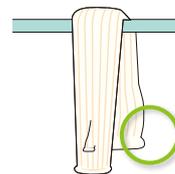

- ・変質するおそれがありますので、アイロンは使用しないでください。
- ・保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。

| 品質表示      |     |
|-----------|-----|
| 綿         | 82% |
| ポリウレタン    | 10% |
| ポリエステル    | 8%  |
| ※ラテックスフリー |     |

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

## 三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル  
株式会社




より効果を感じていただくために、必ずご確認ください。

# 平編み弾性スリーブ「エアボ・ウェーブスリーブ」


## ご使用のしおり

■ 装着方法 ※装着の際はゴム手袋の使用を推奨いたします。

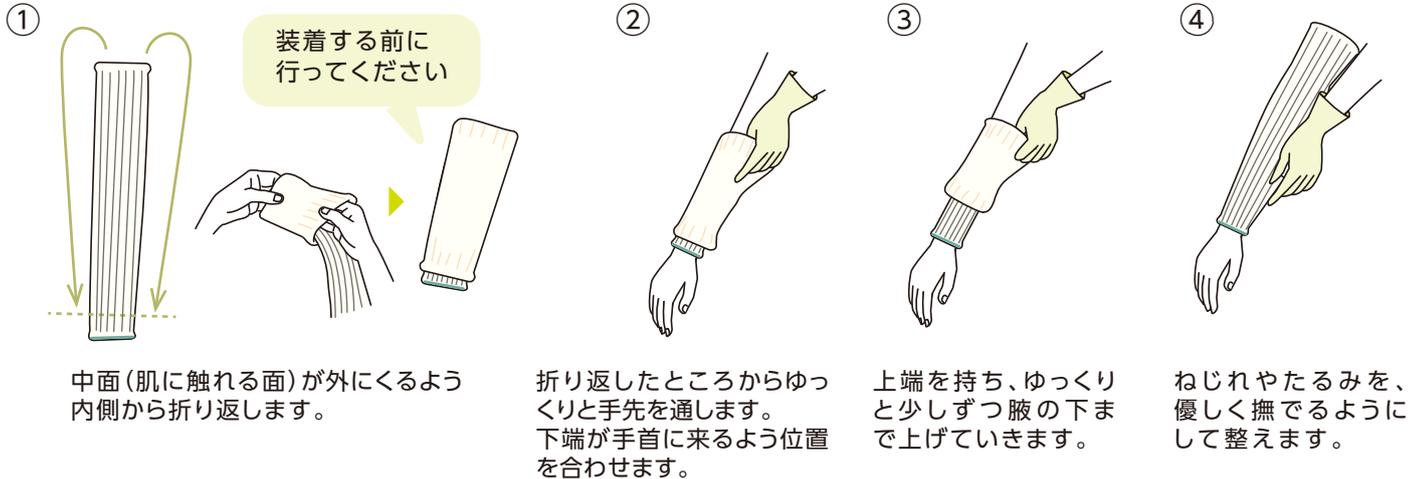

### ■ 装着時の注意点

1 外面の繊維は爪が引っ掛かると、ほつれの原因となりますのでご注意ください。

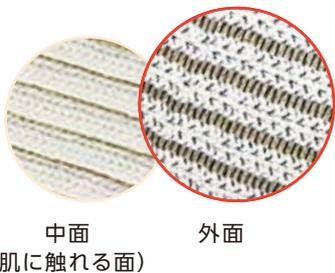

2 装着後は折り返さずにご使用ください。

3 肘を引っぱり上げず少し下げてください。肘を少し下げることでずり落ちを防止します

### ■ 洗濯方法

普段どおりそのまま洗濯機へ天日干し・乾燥機もOK

ネット不要      柔軟剤・漂白剤の使用もOK

干し方 ▶ 中面を裏返し、平干ししてください ※洗濯ばさみは使用しないでください



- ・変質するおそれがありますので、アイロンは使用しないでください。
- ・保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。

| 品質表示      |     |
|-----------|-----|
| 綿         | 82% |
| ポリウレタン    | 10% |
| ポリエステル    | 8%  |
| ※ラテックスフリー |     |

<製品の返品・交換について>      ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

## 三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

