

軽やかで繊細な「ファインシリーズ」が誕生!!

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

平編み弾性スリーブ

特許出願済み

販売名

「エアボ・ウェーブ スリーブ」

ファインシリーズ



想いをカタチに

三優メディカル

さとうリンパ浮腫
研究所

三優メディカル

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発

特許取得済み



オリジナル
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時はのびやすく着けやすい設計でありながら、装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

どなたでも簡単に
装着できて、
浮腫を軽減できる
補助用スリーブです

圧迫力：
20~25
mmHg



平編み弾性グローブ
「エアボ・ウェーブ グローブ」

平編み指用スリーブ
「エアボ・ウェーブ ロンググローブ」

3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット



指の一本一本を
しっかりと包み込み
圧迫します



曲げてもシワが
入りにくい
特殊な編み方で
指を動かした時の
ゴワつきを
軽減しています

さらに上質な心地良さ

ファインシリーズの特長

裏面をご覧ください。

装着方法



①生地を半分に裏返します

②親指を上にして手を入れます

③全体をゆっくり引き上げます

④指の股を整えて肌に密着させます


ファインシリーズの特長

エアボウエーブシリーズの圧迫力はそのままだに、糸や編み方の新仕様によりワンランク上の上質な心地良さを追求しました。

1 なめらかな肌触り

編み方や糸を工夫することで凹凸形状が柔らかくなり、なめらかな肌触りを追求しました。

裏地は綿100%

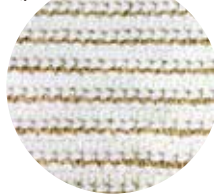

2 軽い着け心地

全体の綿比率 55% の新仕様。従来品と比べ 50% の軽量化を実現し、着け心地がさらに軽くなりました。

3 やさしいベージュカラー


横糸を肌馴染みの良いベージュカラーにすることで、見た目にもやさしい上品な弾性スリーブに仕上がりました。



サイズ一覧

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000001

| 種類 | 品名 | 商品コード | 価格(税別) | B(手背周径) | C(手首周径) | D(前腕周径) | E(肘周径) |
|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|
| グローブ | 4号レギュラー | AWF1-ZC4R | 15,000 | 17~22 | 14~20 | | |
| グローブ | 6号レギュラー | AWF1-ZC6R | 15,000 | 20~25 | 16~24 | | |
| ロンググローブ | 4号レギュラー | AWF1-ZE4R | 20,000 | 17~22 | 14~20 | 23~28 | 24~30 |
| ロンググローブ | 6号レギュラー | AWF1-ZE6R | 20,000 | 20~25 | 16~24 | 26~32 | 28~34 |

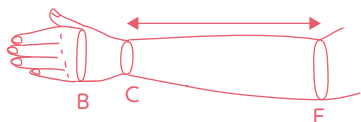

C~E丈
■レギュラー丈
20 ~ 24 cm

色でサイズの識別ができます。

| | | |
|----|------|------|
| 4号 | オレンジ | ■■■■ |
| 6号 | レッド | ■■■■ |

品質表示

綿 55%
ポリウレタン 25%
ポリエステル 20%
※ラテックスフリー

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。



製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL **052-526-5017** FAX **052-526-5018**

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店