



より効果を感じていただくために、必ずご確認ください。

# 平編み弾性スリーブ 「エアボ・ウェーブグローブ & ロンググローブ」 ご使用のしおり

■ 装着方法 ※装着の際はゴム手袋の使用をおすすめいたします。



①生地を半分に裏返します



②親指を上にして手を入れます



③全体をゆっくり引き上げます



④指の股を整えて肌に密着させます

■ 装着時の注意点

1

裏表をお間違えないよう装着してください

2

指の股にしっかりと密着するように装着してください

3

編目のラインにねじれがないよう装着してください



レッドまたはオレンジの印が付いている側が外面です



■ 洗濯方法

普段どおりそのまま洗濯機へ  
天日干し・乾燥機もOK

干し方 ▶ 中面を裏返し、平干ししてください。  
※洗濯ばさみは使用しないでください。

ネット不要 柔軟剤・漂白剤の使用もOK

- ・変質するおそれがありますので、アイロンは使用しないでください。
- ・保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。
- ・装着部に傷、痛み、しびれ等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。

品質表示	
綿	55%
ポリウレタン	25%
ポリエステル	20%
※ラテックスフリー	

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

## 三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル  
株式会社