

# 平編み弾性スリーブ

特許出願済み

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

販売名

## 「エアボ・ウェーブスリーブ」


### アクティブシリーズ

日本製  
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所  
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発



特許取得済み

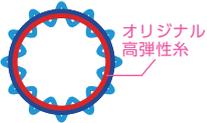

オリジナル  
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時はのびやすく着けやすい設計でありながら、装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

## 3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ  
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の  
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット

弾性ストッキングと重ねばき



エアボウェーブストッキングと重ねばき



長時間にも  
夜間にも  
安心のつけごころ

どなたでも簡単に  
装着できて、  
浮腫を軽減できる  
足指用グローブです

足指のつけ根まで優しく密着  
足うらのむくみケアにも対応します

様々な圧迫用品と組み合わせてお使いいただけます

さらに上質な心地良さ  
アクティブシリーズの特長

裏面をご覧ください。

## 装着方法



① トウキャップに足先を入れます



② 全体をゆっくり引き上げます



③ 足指のつけ根の位置を整えます



④ 足全体の密着感を整えます

## アクティブシリーズの特長

### 1 なめらかな肌触り

上質のオーガニックコットンと柔らかな凹凸形状が足全体を優しく包みます。

### 2 軽快な着け心地&細やかなフィット感

軽くて薄い構造と、日常の細やかな動きへのフィット感を最大限に追及しました。



圧迫力：  
20~30  
mmHg

## サイズ一覧

品名	商品コード	価格(税込)	サイズ
平編み弾性トゥキャップ6号	AWF1-TC6R	¥13,200	フリーサイズ

※6号サイズが適応外の場合、ひとまわり大き目の8号サイズを受注生産にて承ります。(納期2~3週間)

### 品質表示

・綿	45%
・ポリウレタン	30%
・ポリエステル	25%

一般医療機器 医療機器届出番号:23B3X1002300001

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

**三優メディカル株式会社**

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル  
株式会社

取扱店



オーガニックコットンを使用し、サステナブルな商品を目指しています。  
オーガニックコットンとは、「自然環境や栽培に携わる人にやさしい素材」です。