

軽やかで繊細な「ファインシリーズ」が誕生 !!

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

# 平編み弾性スリーブ

特許出願済み

販売名

## 「エアボ・ウェーブ スリーブ」

### ファインシリーズ



さとうリンパ浮腫  
研究所

三優メディカル

日本製  
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所  
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発

特許取得済み



オリジナル  
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時はのびやすく着けやすい設計でありながら、装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

どなたでも簡単に  
装着できて、  
浮腫を軽減できる  
補助用スリーブです

圧迫力：  
20～25  
mmHg



平編み弾性グローブ  
「エアボ・ウェーブ グローブ」

平編み指用スリーブ  
「エアボ・ウェーブ ロンググローブ」

## 3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ  
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の  
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット



指の一本一本を  
しっかりと包み込み  
圧迫します



曲げてもシワが  
入りにくい  
特殊な編み方で  
指を動かした時の  
ゴワつきを  
軽減しています

さらに上質な心地良さ  
「ファインシリーズ」の特長

裏面をご覧ください。

## 装着方法



①生地を半分  
裏返します



②親指を上にして  
手を入れます



③全体をゆっくり  
引き上げます




④指の股を整えて  
肌に密着させます

## ファインシリーズの特長

### 1 なめらかな肌触り

編み方や糸を工夫すること  
で凹凸形状が柔らかくなり、  
なめらかな肌触りを追求  
しました。

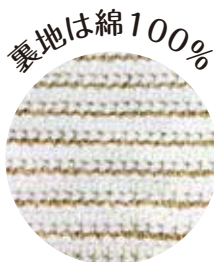

### 2 軽い着け心地

全体の綿比率55%の新仕様。  
従来品と比べ50%の軽量化を  
実現し、着け心地がさらに軽  
くなりました。

### 3 やさしいベージュカラー

横糸を肌馴染みの良いベージュカラー  
にすることで、見た目にもやさしい  
上品な弾性スリーブに仕上がりました。




エアボウエーブシリーズの圧迫力はそのまに、  
糸や編み方の新仕様によりワンランク上の  
上質な心地良さを追求しました。

## サイズ一覧

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000001

| 種 類     | 品 名     | 商品コード     | 価格(税込)  | B(手背周径) | C(手首周径) | D(前腕周径) | E(肘周径)  |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| グローブ    | 4号レギュラー | AWF1-ZC4R | 18,700円 | 17~22cm | 14~20cm | —       | —       |
| グローブ    | 6号レギュラー | AWF1-ZC6R | 18,700円 | 20~25cm | 16~24cm | —       | —       |
| ロンググローブ | 4号レギュラー | AWF1-ZE4R | 25,300円 | 17~22cm | 14~20cm | 23~28cm | 24~30cm |
| ロンググローブ | 6号レギュラー | AWF1-ZE6R | 25,300円 | 20~25cm | 16~24cm | 26~32cm | 28~34cm |

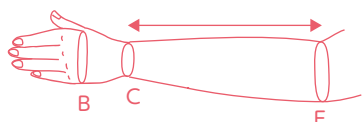

C~E 丈  
■レギュラー丈  
20 ~ 24 cm

色でサイズの識別が  
できます。

|    |      |      |
|----|------|------|
| 4号 | オレンジ | ■■■■ |
| 6号 | レッド  | ■■■■ |

#### 品質表示

綿 55%  
ポリウレタン 25%  
ポリエステル 20%  
※ラテックスフリー

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:



三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店



オーガニックコットンを使用し、サステナブルな商品を目指しています。  
オーガニックコットンとは、「自然環境や栽培に携わる人によさしい素材」です。